



## Руководство по эксплуатации наборов гинекологических «Юнона»

Наборы гинекологических «Юнона» (№№ 0, 1S, 1M, 1L, 1S+, 1M+, 1L+, 2S, 2M, 2L, 2S+, 2M+, 2L+, 3S, 3M, 3L, 3S+, 3M+, 3L+, 4S, 4M, 4L, 4S+, 4M+, 4L+, 5S, 5M, 5L, 5S+, 5M+, 5L+, 6S, 6M, 6L, 6S+, 6M+, 6L+, 7S, 7M, 7L, 7S+, 7M+, 7L+, 8S, 8M, 8L, 8S+, 8M+, 8L+, 9S, 9M, 9L, 9S+, 9M+, 9L+) комплектуются одноразовым стерильным инструментарием и принадлежностями для акушерско-гинекологических осмотров и забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований.

**ПОКАЗАНИЯ:** акушерско-гинекологический осмотр, забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** не имеется.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** Недопустимо повторное применение наборов. Недопустимо применение наборов при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки. Недопустимо применение наборов при превышении сроков годности, указанных на этикетке. Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки. Применять наборы необходимо непосредственно после вскрытия конечной упаковки. Наборы гинекологических «Юнона» должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРОВ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ «ЮНОНА»

#### Набор гинекологический «Юнона» № 0

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
  2. Перчатки смотровые (пара).
  3. Стерилизационная (конечная) упаковка.
- Набор предназначен для проведения медицинского осмотра.

#### Набор гинекологический «Юнона» №№ 1S, 1M, 1L, 1S+, 1M+, 1L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
  2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
  3. Перчатки смотровые (пара).
  4. Бахилы (пара) – поставляются в наборах №№ 1S+, 1M+, 1L+.
  5. Стерилизационная (конечная) упаковка.
- Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах.

#### Набор гинекологический «Юнона» №№ 2S, 2M, 2L, 2S+, 2M+, 2L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
  2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
  3. Шпатель Эйлера.
  4. Перчатки смотровые (пара).
  5. Бахилы (пара) – поставляются в наборах №№ 2S+, 2M+, 2L+.
  6. Стерилизационная (конечная) упаковка.
- Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах. Шпатель Эйлера предназначен для забора материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки и из нижней 1/3 цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований.

#### Набор гинекологический «Юнона» №№ 3S, 3M, 3L, 3S+, 3M+, 3L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
  2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
  3. Ложка Фолькмана.
  4. Перчатки смотровые (пара).
  5. Бахилы (пара) – поставляются в наборах №№ 3S+, 3M+, 3L+.
  6. Стерилизационная (конечная) упаковка.
- Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах. Входящая в состав набора ложка Фолькмана предназначена для забора материала с поверхности слизистой влагалища, из цервикального канала и уретры для бактериологических исследований.

#### Набор гинекологический «Юнона» №№ 4S, 4M, 4L, 4S+, 4M+, 4L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
  2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
  3. Перчатки смотровые (пара).
  4. Цитощетка.
  5. Бахилы (пара) – поставляются в наборе №№ 4S+, 4M+, 4L+.
  6. Стерилизационная (конечная) упаковка.
- Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах. Цитощетка предназначена для забора материала с поверхности слизистой влагалища или из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований.

#### Набор гинекологический «Юнона» №№ 5S, 5M, 5L, 5S+, 5M+, 5L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
  2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
  3. Шпатель Эйлера.
  4. Ложка Фолькмана.
  5. Цитощетка.
  6. Предметное стекло (2 шт.).
  7. Перчатки смотровые (пара).
  8. Бахилы (пара) – поставляются в наборах №№ 5S+, 5M+, 5L+.
  9. Стерилизационная (конечная) упаковка.
- Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра в зеркалах поверхности слизистой влагалища, шейки матки. Входящие в состав набора инструменты (ложка Фолькмана, цитощетка, шпатель Эйлера) позволяют выполнить взятие материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки, из уретры и цервикального канала как для цитологических, так и для бактериологических исследований. Целесообразно использование набора данной комплектации при проведении ежегодной диспансеризации населения.

### Набор гинекологический «Юнона» №№ 6S, 6M, 6L, 6S+, 6M+, 6L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Цитощетка с тампоном.
4. Предметное стекло (2 шт.).
5. Перчатки смотровые (пара).
6. Бахилы (пара) – поставляются в наборе №№ 6S+, 6M+, 6L+.
7. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка с тампоном предназначена для взятия материала для цитологических исследований с нескольких участков слизистой (поверхность шейки матки или слизистая влагалища и цервикальный канал). Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки, беременных пациенток.

### Набор гинекологический «Юнона» №№ 7S, 7M, 7L, 7S+, 7M+, 7L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Цитощетка со шпателем.
4. Предметное стекло (2 шт.).
5. Перчатки смотровые (пара).
6. Бахилы (пара) – поставляются в наборе №№ 7S+, 7M+, 7L+.
7. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка со шпателем позволяет взять материал для цитологических исследований с поверхности шейки матки или со слизистой влагалища и из цервикального канала. Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки.

### Набор гинекологический «Юнона» №№ 8S, 8M, 8L, 8S+, 8M+, 8L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Цитощетка с цервикальной щеткой.
4. Предметное стекло (2 шт.).
5. Перчатки смотровые (пара).
6. Бахилы (пара) – поставляются в наборе №№ 8S+, 8M+, 8L+.
7. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал. Цитощетка с цервикальной щеткой, входящая в состав набора, позволяет выполнить взятие материала для цитологических исследований с поверхности шейки матки и из цервикального канала. Целесообразно применение набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки матки.

### Набор гинекологический «Юнона» №№ 9S, 9M, 9L, 9S+, 9M+, 9L+

Состав набора:

1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Ложка Фолькмана.
4. Цитощетка.
5. Цитощетка с тампоном.
6. Предметное стекло (2 шт.).
7. Перчатки смотровые (пара).
8. Бахилы (пара) – поставляются в наборе №№ 9S+, 9M+, 9L+.
9. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью зеркал, взятия материала с поверхности слизистой влагалища, уретры, из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований. Целесообразно использование набора данной комплектации при выполнении кольпоскопии.

По требованию Заказчика допускается изменение комплектации наборов.

### МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Акушерско-гинекологический осмотр с использованием наборов гинекологических «Юнона» должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку набора и извлечь подкладную пеленку и бахилы (для наборов в исполнении «+»).
2. Передать пациентке бахилы (для наборов в исполнении «+»).
3. Подкладную пеленку поместить на гинекологическое кресло, затем одеть перчатки.
4. Применять инструменты, входящие в состав наборов в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного инструмента.
5. Использованные инструменты, подкладные пеленки, бахилы и перчатки после дезинфекции подлежат утилизации.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Сатурн»  
пр-т Лядникова, 13-413, г. Витебск,  
Республика Беларусь, 210023  
тел.: +375 (212) 623233



Медицинское предприятие  
**Сатурн**  
www.simurg-mp.com